


ADIM ADIM ÖZET KILAVUZ

Çubuk ekspander sistemi

PENIMASTER[®] PRO

ADIM ADIM ÖZET KILAVUZ

Kayış ekspander sistemi

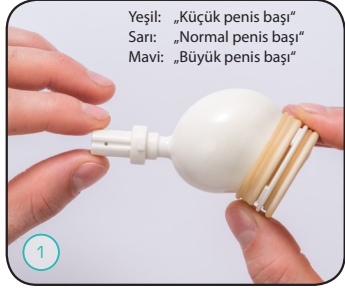

Döner ventili saat yönünün tersine döndürün ve kapatın.



Birkaç damla ProMaster sıvısını penis başına sürün ve dağıtın.



3-4 damla ProMaster sıvısını lateks parçanın iç tarafına sürün ve dağıtın.



• El pompasını **tamamen** bastırın.
• El pompasını **basılı tutun** (Plastik üzerindeki işaret yukarı bakar) ve **kapalı** olan döner ventil üzerine takın.



• Penis başı bölmesi ve el pompasını karşılıklı döndürün
• El pompasını **azami** seviyede bastırın.
• Penis başını **yumuşak** bir şekilde penis bölmesine karşı bastırın.




Elinizi **yavaşça** açın. Bu durumda penis başı, oluşan vakum nedeniyle penis başı bölmesine emilir.
TÜYO: Penis başı komple bölme içine emilmediğinde:
• El pompasını geri döndürün ve çıkarın
• yeniden bastırın
• tekrar takın ve döndürün
• yeniden bırakın.




El pompasını saat yönünün tersine döndürün ve çıkarın. Döner ventili kapalı tutun.




Uzatma çubuklarını ayarlayın Çubuk uzunluğu genişmiş penis uzunluğu + 1,5 cm olacak şekildedir.

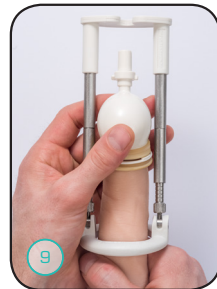

Takılmış olan penis başı bölmesini çubuk mekanizması içine itin.

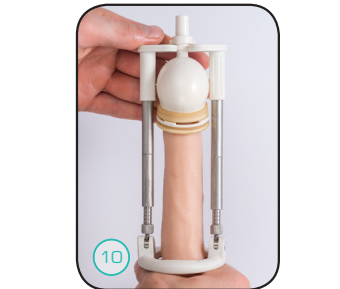

• Penis genişletin
• penis başı bölmesinin dar parçasını tutma elemanı içine bastırın.
• Bırakın.
Çekme kuvvetini yaylı terazi ile kontrol edin:
• Her bir işaret yaklaşık 230 grama denk gelir.
• Çekme kuvvetini azaltmak için daha kısa çubuklar kullanın.
• Çekme kuvvetini artırmak için daha uzun çubuklar veya vidalı civatalar kullanın.

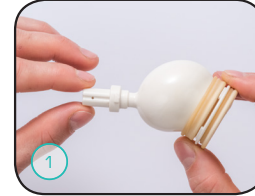

Döner ventili saat yönünün tersine döndürün ve kapatın.

Yeşil: „Küçük penis başı“
Sarı: „Normal penis başı“
Mavi: „Büyük penis başı“



Birkaç damla ProMaster sıvısını penis başına sürün ve dağıtın.



3-4 damla ProMaster sıvısını lateks parçanın iç tarafına sürün ve dağıtın.



• El pompasını tamamen bastırın.
• El pompasını basılı tutun (Plastik üzerindeki işaret yukarı bakar) ve kapalı olan döner ventil üzerine takın.




• Penis başı bölmesi ve el pompasını karşılıklı döndürün
• El pompasını azami seviyede bastırın.
• Penis başını yumuşak bir şekilde penis bölmesine karşı bastırın.




Elinizi yavaşça açın. Bu durumda penis başı, oluşan vakum nedeniyle penis başı bölmesine emilir.
TÜYO: Penis başı komple bölme içine emilmediğinde:
• El pompasını geri döndürün ve çıkarın
• yeniden bastırın
• tekrar takın ve döndürün
• yeniden bırakın.



El pompasını saat yönünün tersine döndürün ve çıkarın. Döner ventili kapalı tutun.

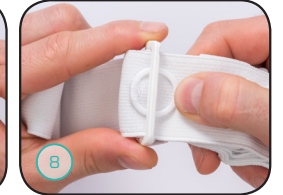

• Kayışı kullanıcının boyuna göre ayarlayın.
• Penis üzerindeki çekme kuvvetini azaltmak için kayışı uzatın
• Penis üzerindeki çekme kuvvetini yükseltmek için kayışı kısaltın.

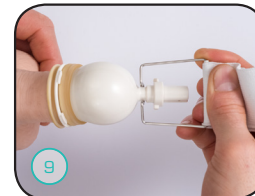


• Metal bağlantı parçasını penis başı bölmesinin dar parçası içine klipsleyin.
• Kayıştan çekerek bağlantıyı sıkın.



• Penis belin soluna veya sağına bakacak şekilde pozisyonlayın.



• Kayışı sırt ve baldırın etrafından geçirin.
• Kayışı halkaya veya direkt olarak kayışa klipsleyin.

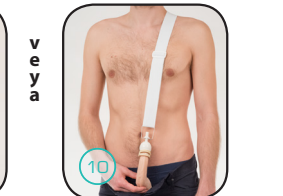

• Penis yukarı doğru getirin.
• Kayışı omuz üzerinden geçirin ve takın.



• Kayışı omuz üzerinden çapraz şekilde takın.
• Kayışı pantolona klipsleyin.



• Sandalye üzerine oturun.
• Kayışı baldırınızın altından geçirerek takın.



Kayışın boş ucunu penise bağlı olan kayış parçası etrafına dolayın.



Kayışı klips ile bir halkaya klipsleyin.